



Zaslon

Tipke

Vodilica  
trake za  
testiranje




Traka za  
testiranje

## Tri koraka za mjerenje šećera u krvi



1  
Lagano gurnite traku za testiranje u vodilicu trake za testiranje u smjeru označenom strelicom.

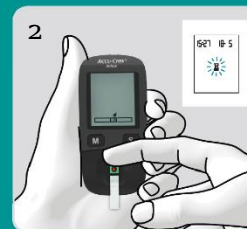


2  
Kada se prikaže trepereći simbol kapljice, nanosite kap krvi na sredinu zelenog polja. Nakon približno 5 sekundi rezultat testa pojavit će se na zaslonu.

### Doziranje izvan mjerača



3  
Mjerač se automatski isključuje kada se iz njega ukloni traka za testiranje.

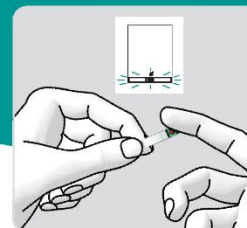

Kada se prikaže trepereći simbol kapljice, izvadite traku za testiranje iz mjerača. Nanesite kap krvi na traku za testiranje i ponovno umetnite traku u mjerač u roku od približno 20 sekundi.



Gumb za napetost

Gumb za otpuštanje



Zaštitni poklopac

Lanceta

Rotirajući poklopac


## Uporaba lancetara Accu-Chek Softclix




Prije uzimanja uzorka krvi operite ruke toplom vodom i sapunom. Temeljito osušite ruke.



Povucite poklopac ravno prema van da biste ga uklonili. Nemojte zakretati poklopac.

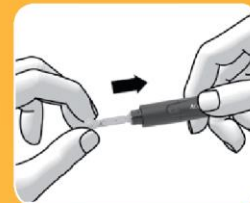

Umetnite novu lancetu u držač lancete do kraja. Morate čuti da je lanceta sjela na mjesto.

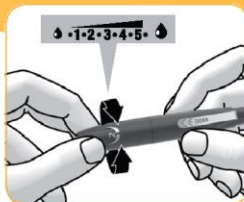

Rotirajte poklopac dok se u otvoru ne prikaže željena dubina prodiranja.



Pritisnite gumb za pripremu do kraja. Nemojte istovremeno pritisnuti gumb za otpuštanje. Lancetar je pripremljen kada je sredina gumba za otpuštanje žute boje.



Uklonite poklopac s lancetara. Gurnite izbacivač prema naprijed. Izbacuje se iskorištena lanceta. Vratite poklopac na mjesto.



Gumb za napetost

Svaki bubanj lanceta sadrži 6 lanceta



Bubanj lanceta

Rotirajući poklopac s 11 dubina prodiranja

## Uporaba lancetara Accu-Chek FastClix



Prije uzimanja uzorka krvi operite ruke toplom vodom i sapunom.  
Temeljito osušite ruke.



Uklonite poklopac s lancetara.



Umetnite novi bubanj lanceta u lancetar tako da je bijeli kraj okrenut prema naprijed.



Bubanj lanceta pravilno je umetnut kada se u potpunosti nalazi unutar lancetara, a samo izbočeni rub izlazi iz lancetara s prednje strane.

Zamijenite poklopac.



Rotirajte poklopac dok se željena dubina prodiranja ne poravna s indikatorom.



Čvrsto pritisnite lancetar na odabrano mjesto uboda.

Pritisnite gumb za otpuštanje do kraja, lanceta se otpušta i prodire u kožu.

Izmjerite razinu glukoze u krvi odmah nakon uzimanja krvi.