



Bežično povezivanje



Zaslon

Test traka

Gumbi

Gumb za izbacivanje trake

Osvijetljen otvor za traku

Testiranje glukoze u krvi



Prije početka testiranja obavezno ruke operite toplom vodom i sapunom te ih temeljito osušite.

Izvadite test traku iz spremnika otpornog na ispadanje. Čvrsto zatvorite poklopac.



Umetnite metalni kraj test trake u mjerac.



Dodirnite **žuti rub** test trake do kapi krvi. Maknite prst s test trake kada se na zaslonu prikaže „Analyzing“ (Analiziranje).



Rezultat testa prikazuje se na zaslonu za manje od 4 sekunde.


A Dodavanje komentara



1. Nakon mjerenja glukoze u krvi pritisnite **OK** (U redu) da biste po želji dodali komentar.

2. Pojavljuje se izbornik Add Comment (Dodavanje komentara). Pritisnite **▼** da biste istaknuli željeni komentar. Pritisnite **OK** (U redu) za odabir.




B Pregled dnevnika

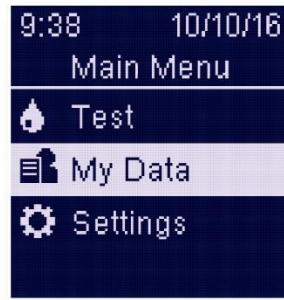

1. Na Main Menu (Glavnom izborniku) pritisnite **▼** da biste istaknuli My Data (Moji podaci). Pritisnite **OK** (U redu).

2. Ponovo pritisnite **OK** (U redu) da biste odabrali Logbook (Dnevnik).
3. Da bi se prikazale pojedinosti o rezultatu, istaknite rezultat i pritisnite **OK** (U redu).

C Postavljanje ciljnog raspona

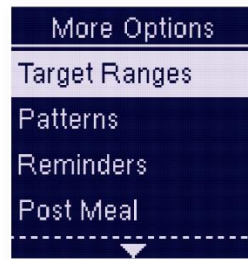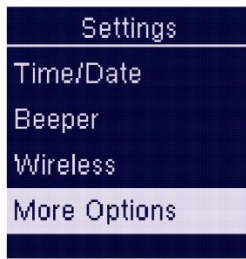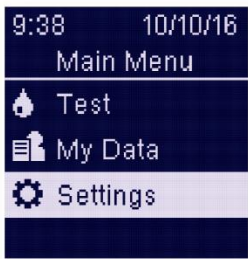

1. Na Main Menu (Glavnom izborniku) pritisnite **▼** da biste odabrali Settings (Postavke). Pritisnite **OK** (U redu) za odabir.


2. Pritisnite **▼** da biste odabrali More Options (Dodatne mogućnosti). Pritisnite **OK** (U redu) za odabir.

3. Odaberite Target Ranges (Ciljni rasponi). Pritisnite **OK** (U redu) za odabir.

4. Pritisnite **▲** ili **▼** da biste istaknuli Off (Isključeno), Single Range (Jedan raspon) ili 2 Ranges (2 raspona). Pritisnite **OK** (U redu) da biste odabrali mogućnost.

5. Pritisnite **▲** ili **▼** da biste prilagodili donju granicu raspona Before Meal Target (Cilj prije obroka). Pritisnite **OK** (U redu) da biste postavili i prešli na sljedeće polje.

D Prikaz postotka ciljnog raspona

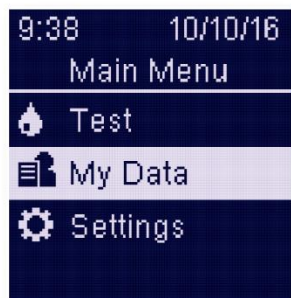

Napomena: da bi se mogli pregledati rezultati za Target % (Cilj %), u mjerачu se moraju postaviti ciljni rasponi.

1. Na Main Menu (Glavnom izborniku) pritisnite **▼** da biste istaknuli My Data (Moji podaci).

2. Pritisnite **▼** da biste istaknuli Target % (Cilj %). Pritisnite **OK** (U redu) da biste odabrali tu mogućnost.

3. Da bi se prikazale pojedinosti, istaknite željenu kategoriju i pritisnite **OK** (U redu), a zatim odaberite vremensko razdoblje.

4. Pregledajte rezultate.



ACCU-CHEK i ACCU-CHEK GUIDE žigovi su društva Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care

www.accu-check.com
Roche Diabetes Care GmbH · Sandhofer Str. 116 · D-68305 Mannheim

ACCU-CHEK®